

# Verwendungshinweise FLOWSTREAM

Um Sauerstoff aus Druckgasflaschen entnehmen zu können, wird eine Entnahmearmatur wie zum Beispiel der FLOWSTREAM benötigt.

## 1 Montage

Der FLOWSTREAM ist mit einer O-Ring-Dichtung und einem Handanzug ausgestattet. Der Handanzug darf nicht mit Schraubenschlüssel oder Zange angezogen oder gelöst werden! Dies würde den Dichtungsring zerstören.

Ziehen Sie die Rändelmutter der Armatur mit der Hand fest. Durch den Druckaufbau beim Öffnen des Flaschenabsperrentils quillt der Dichtungsring auf, wird fest in seinen Sitz gepresst und garantiert optimale Dichtigkeit.

## 2 Demontage

Solange die Armatur unter Druck steht (offenes Flaschenventil), kann sie nicht manuell von der Flasche gelöst werden, ohne dass der Dichtungsring zerstört wird!


Gehen Sie zum Lösen des FLOWSTREAM wie folgt vor:

1. Schliessen Sie das Absperrventil der Flasche
2. Entlasten Sie den FLOWSTREAM, indem Sie für einige Sekunden den Durchflussregler öffnen
3. Lösen Sie die Rändelmutter manuell und ohne Zuhilfenahme eines Werkzeugs vom Ausgangsanschluss des Absperrventils der Flasche

## 3 Einstellung eines Durchflusses

Beim FLOWSTREAM wird der Durchfluss mittels einer Lochblende geregelt. Dadurch ist keine kontinuierliche Abstufung möglich. Die Dosierungsstufe ist jedoch langjährig erprobt und entspricht den in der Medizin üblichen Dosierungen.

Achten Sie darauf, dass im Gebrauch der Regler immer auf einer Rastposition steht. Andernfalls kann der Gasdurchfluss unterbrochen werden!

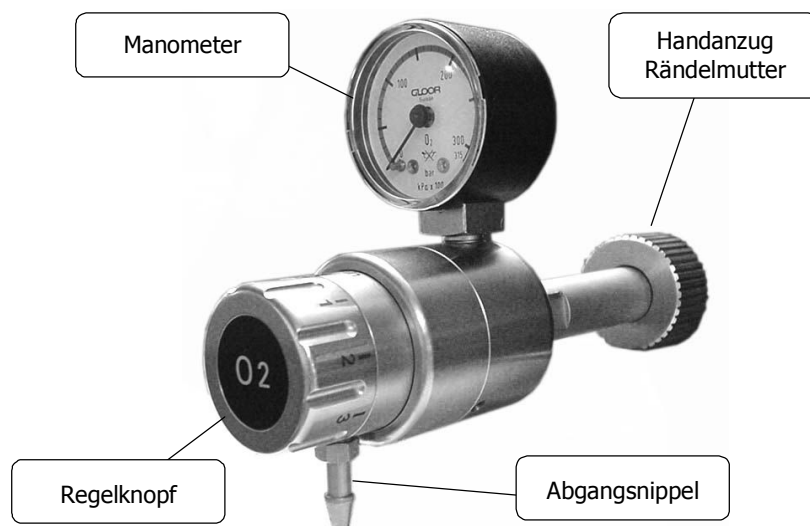

CARBAGAS AG

Homecare

Waldeggstrasse 38

3097 Liebefeld-Bern

Tel. 0800 428 428 oder 031 972 23 33

Fax 031 978 78 01

e-mail [homecare.info@carbagas.ch](mailto:homecare.info@carbagas.ch)