

## Füllen eines Portables SPIRIT

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Füllung eines Portables SPIRIT auf einer Reserve FREELOX 2. Detaillierte Anweisungen finden sich im Carbagas Merkblatt *Bedienung Portables SPIRIT*.

1



Rote resp. orange Schutzkappe vom Füllanschluss abnehmen.

2



Wischen Sie vor dem Füllen das Füllfach der Reserve mit einem fusselfreien Lappen sauber und trocknen sie den Füllanschluss der Reserve.

3



Trocknen sie den Füllanschluss des Portables.

4



Das Portable sorgfältig senkrecht von oben in die Aussparung der Reserve stellen, leicht hinunterdrücken und halten. Das Gerät rastet nicht ein.

5



Leichten Druck auf das Portable aufbringen und halten. Das Gerät rastet nicht ein. Den Entlastungshebel am Portable ca. 90° umklappen und füllen.

6



Das Portable ist voll, wenn Nebelwolken aus den Belüftungsschlitzen der Reserve quellen.

7



Nach dem Füllen zuerst den Entlastungshebel zurück klappen und dann das Portable durch leichten Zug am Tragegriff lösen.

8



Kontrollieren Sie den Füllstand mittels der eingebauten Federwaage.

Ihre Ansprechpartnerin im Bereich Homecare:  
Competence-Center Homecare, Frau Susanne Schori, Tel. 0800 428 428