

## Consigli per l'uso del FLOWSTREAM

Per poter prelevare ossigeno da una bombola a pressione, viene usato un attrezzo di prelievo come per esempio il FLOWSTREAM.

### 1 Montaggio

Il FLOWSTREAM é dotato di una guarnizione circolare e un invito manuale. L'invito manuale non dev'essere mai avvitato/svitato con una chiave o una tenaglia. Questo distruggerebbe la guarnizione.

Avvitare il dado zigrinato dell'armatura manualmente. Con la pressurizzazione durante l'apertura della valvola di arresto della bombola la guarnizione si gonfia e viene pressata nella battuta, garantendo così un'ottima impermeabilità.

### 2 Smontaggio

Fin quando l'armatura é sotto pressione (valvola della bombola aperta) non può essere svitata manualmente dalla bombola senza che la guarnizione venga distrutta!

Per togliere il FLOWSTREAM proseguire come segue:

1. Chiudere la valvola d'arresto della bombola
2. Scaricare il FLOWSTREAM aprendo per alcuni secondi il regolatore del flusso
3. Allentare il dado zigrinato manualmente (senza l'aiuto di un qualsiasi attrezzo) dall'attacco di uscita della valvola d'arresto della bombola.

### 3 Regolazione del flusso

Al FLOWSTREAM la pressione viene regolata tramite un diaframma a foro. In questo modo non é possibile una graduazione continua. Il grado di dosaggio é stato comunque testato nell'arco di molti anni e nel campo della medicina corrisponde ai comuni dosaggi.

Prestate attenzione che, durante l'uso il regolatore sia sempre in posizione d'incastro. Altrimenti il flusso del gas viene interrotto!



CARBAGAS AG

Homecare

Waldeggstrasse 38

3097 Liebefeld-Berna

Tel. 0800 428 428 oppure 031 972 23 33

Fax 031 978 78 01

e-mail [homecare.info@carbagas.ch](mailto:homecare.info@carbagas.ch)