

# Mode d'emploi FLOWSTREAM

Pour que l'oxygène puisse être prélevé de bouteilles de gaz comprimé, des appareils de prélèvement comme par exemple le FLOWSTREAM sont requis.

## 1 Montage

Le FLOWSTREAM est équipé d'un joint torique d'étanchéité et d'un serrage à la main. Le serrage à la main ne doit pas être serré ou desserré à l'aide d'une pince ou d'une clé à écrou ! De cette manière le joint serait détruit.

Serrez l'écrou de serrage de l'appareil à la main. Par la montée de pression suite à l'ouverture du robinet de la bouteille, le joint gonfle, sera forcé dans sa rainure et garantit l'étanchéité parfaite.

## 2 Démontage

Quand l'appareil est sous pression (robinet de bouteille ouvert), il ne peut pas être desserré de la sortie de la bouteille sans que le joint soit détruit !


Pour desserrer le FLOWSTREAM de la bouteille, procédez comme suit :

1. Fermez le robinet de la bouteille.
2. Dépressurisez le FLOWSTREAM en ouvrant le régulateur de débit pour quelques secondes.
3. Desserrez l'écrou de serrage du raccord de sortie de la bouteille manuellement **sans utiliser d'outils quelconques**.

## 3 Régulation d'un débit

Sur le FLOWSTREAM le débit est réglé à l'aide d'un bandeau à trou. De ce fait, une gradation continue n'est pas possible. Cependant, cette gradation des dosages a fait ses preuves et correspond aux dosages médicaux communs.

Lors de l'utilisation veillez au positionnement du régulateur sur un cran d'arrêt, sinon le flux de gaz peut être coupé !

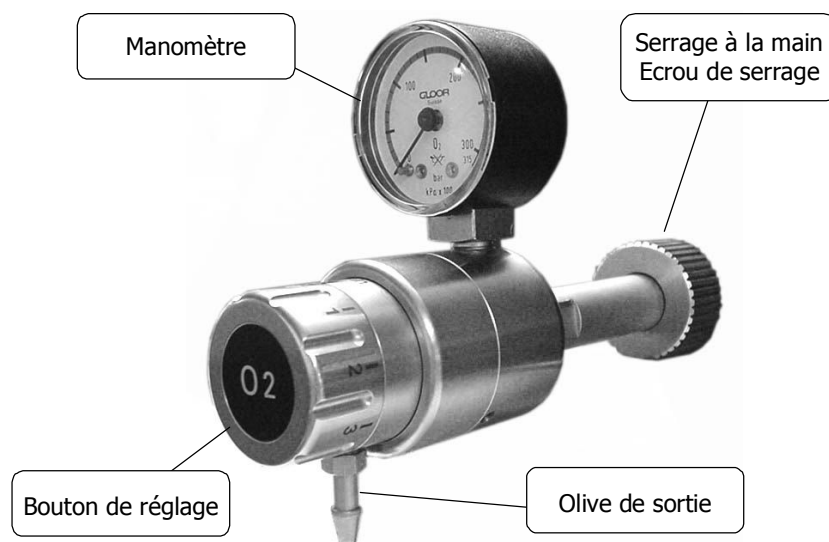

CARBAGAS AG

Homecare

Waldeggstrasse 38

3097 Liebefeld-Bern

Tél. 0800 428 428 ou 031 972 23 33

Fax 031 978 78 01

e-mail [homecare.info@carbagas.ch](mailto:homecare.info@carbagas.ch)