

Istruzioni d'uso per portatili FREELOX

1 Modelli di portatili



FREELOX 1.2L



FREELOX 0.5L

2 Utilizzo

2.1 Ricarica del portatile



1 Prima del travaso togliere il coperchio rosso/arancione di protezione contro il freddo dall'attacco di riempimento e la copertura di fondo del portatile.



3 Prima di ricaricare il portatile, pulite il compartimento di ricarica della riserva con un panno e asciugate bene gli attacchi della riserva e del portatile.



5 Posizionare con cautela il portatile verticalmente sull'attacco della riserva.



6 Premere leggermente il portatile e mantenere. Il portatile non s'incestra.



7 Abbassare la leva di 90° e riempire il portatile.




9 Il portatile è pieno quando fuoriesce vapore bianco dalle fessure della riserva. Una cosa normalissima.



10 Dopo la ricarica, tirare delicatamente il portatile per il manico. Non esercitare troppa forza.

2.2 Verifica dell'indicatore di livello

La tabella vi indica il contenuto del contenitore.

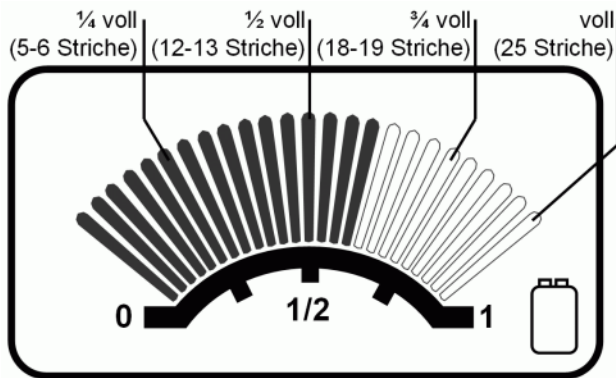


Quando scompare il simbolo della batteria, allora dev'essere sostituita (vedi par. 2.5).

2.3 Montaggio degli occhiali nasali

Inserire l'attacco degli occhiali nasali nell'apposito attacco del tubo.


2.4 Regolazione del flusso

Il flusso si può regolare con la manopola sulla parte superiore del portatile.

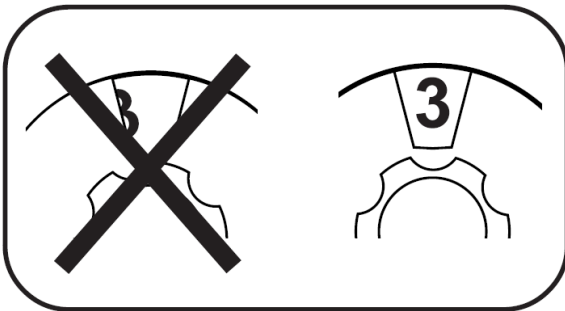

Attenzione: Fare **incastare** sempre la posizione scelta, altrimenti il flusso può essere interrotto.

2.5 Sostituzione delle batterie

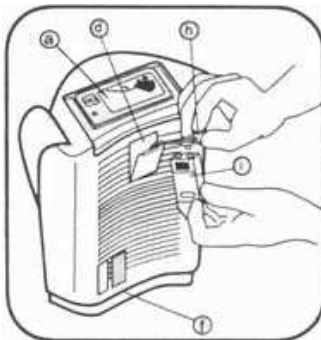

Per sostituire le batterie nel portatile FREELOX, svitare il coperchio con un cacciavite oppure con una moneta.

3 Autonomia

Nella seguente tabella vi forniamo una panoramica dell'autonomia ideale che può raggiungere un portatile pieno.

Tipo di contenitore:	Portatile	
	0.5L	1.2L
Flusso (l/min. gassoso)	0.25	7
	0.5	7
	0.75	---
	1	5
	1.5	3 3/4
	2	2 3/4
	2.5	2 3/4
	3	1 3/4
	4	1 1/2
	5	1
6	3/4	
7	3/4	

Indicazioni in ore.

4 Pulizia e disinfezione

4.1 Pulizia

Pulire o disinfettare gli apparecchi solo esternamente. Non utilizzare prodotti fortemente abrasivi. Utilizzare un po' di detersivo per piatti. Risciacquare con acqua.

Attenzione: Per la pulizia non usare solventi infiammabili (acetone, benzina, petrolio, nitro ecc.) (Vedi scheda di sicurezza)!

4.2 Imbottitura di feltro

Nel piede del contenitore, i portatili FREELOX contengono un'imbottitura di feltro. Lavarla e lasciarla asciugare regolarmente, per evitare che si formino muffa e cattivi odori.

Rimuovete il coperchio del fondo del contenitore, togliete l'imbottitura di feltro umida e mettetene una asciutta.

In caso di bisogno, il vostro assistente ve ne procurerà delle nuove.

5 Disturbi della funzionalità

Rimedi per possibili disturbi si trovano sulla scheda principale dell'uso degli apparecchi.

CARBAGAS AG

Homecare

Waldeggstrasse 38

3097 Liebefeld-Berna

Tel. 0800 428 428 oppure 031 972 23 33

Fax 031 978 78 01

e-mail homecare.info@carbagas.ch