

Remplissage d'un Portable SPIRIT

Une instruction qui démontre pas à pas comment remplir un Portable FREELOX sur une Réserve FREELOX 2. Vous trouvez les instructions détaillées dans le mémento Carbagas *Utilisation portable SPIRIT*.

1



Enlever le capuchon rouge resp. orange du raccord de remplissage.

2



Avant de remplir le portable, nettoyez et séchez le compartiment de remplissage et le raccord de remplissage de la Réserve avec un chiffon non peluchant.

3



Séchez le raccord femelle du Portable.

4



Poser soigneusement le Portable à la verticale dans le compartiment de remplissage. L'appareil ne s'enclenche pas.

5



Effectuer une puissance légère au Portable et le tenir. L'appareil ne s'enclenche pas. Tirer le levier d'évent d'environ 90° et remplir le Portable.

6



Le portable est plein dans l'instant où de la brume blanche s'apprête à sortir des ouvertures d'aération de la Réserve.

7



Après le remplissage, remettre le levier d'évent en position initiale et enlever le Portable le cas échéant par une traction légère à la poignée.

8



Contrôlez le niveau de remplissage à l'aide du peson à ressort.

Votre interlocutrice dans le domaine Homecare :
Compétence-Center Homecare, Mme Susanne Schori, Tél. 0800 428 428