

Sécurité lors de manipulation d'oxygène médical (O₂-med.)



SÉCURITÉ

1. L'oxygène médical est un médicament ; il est donc soumis au contrôle de Swissmedic.
2. L'oxygène médical ne peut être utilisé que sur recommandation médicale ou selon prescription à fin thérapeutique.
3. L'oxygène favorise la combustion. Un faible enrichissement de l'air en oxygène suffit à augmenter considérablement le danger d'incendie.
Ne pas fumer lors de l'utilisation d'oxygène !
Ne pas laisser s'échapper l'oxygène contre les habits.
4. Les bouteilles d'oxygène et leur équipement doivent être tenus propres et absolument exempts d'huile et de graisse.
L'utilisation d'appareils contaminés avec de l'huile ou de la graisse est très dangereuse, ils doivent être mis hors service et retournés au fournisseur pour révision.
5. Mettre les bouteilles en sûreté, les protéger de l'échauffement et de dommages matériels.
6. Arrimer les bouteilles contre la chute ; ne pas les jeter ou les laisser tomber.
7. Ne transporter et entreposer les bouteilles que si elles sont équipées de leur chapeau de protection.
8. Ouvrir lentement, et à deux mains, le robinet de la bouteille. Après utilisation refermer les robinets.

SM 09f - 9.2005

Carbagas